

Handleiding handreinigungsunit

Lees voor ingebruikname deze handleiding zorgvuldig door

Technische werking

- Deze handreinigungsunit werkt mechanisch er is dus **geen** elektra aansluiting nodig.
- Door het indrukken van het voetpedaal wordt de kracht overgezet op een mechanische cilinder.
- Deze cilinder zorgt er vervolgens voor dat de PureMed (hydraterend handreinigingsmiddel op medische basis, met biologische alcohol) naar de sproeiers in de unit wordt geleid.
- De unit bevat een 5-liter reservoir (jerrycan) voor de aanvoer van PureMed handreinigingsmiddel.

Ingebruikname

- Zorg ervoor dat de verantwoordelijke(n) voor plaatsing en onderhoud van de handreinigungsunit volledig zijn geïnformeerd over de werking, ingebruikname en veiligheidseisen van de handreinigungsunit.
- **Roken en open vuur zijn uitdrukkelijk verboden in de nabijheid van de unit.**
- **De handreinigungsunit is geen speeltoestel, klimtoestel of speelgoed.**
- **Handreiniging door kinderen altijd onder begeleiding van een volwassene.**
- **Verplaats de handreinigungsunit altijd en uitsluitend rechtop.**
- Plaats de unit op een vlakke en stevige ondergrond en op een positie waar deze niet de doorgang belemmert.
- Zorg dat de gebruiksinstructies en de veiligheidspictogrammen op de unit altijd zichtbaar zijn.
- Zorg ervoor dat de unit in het zicht en binnen bereikbaarheid staat van een verantwoordelijke.
- Gebruik de unit uitsluitend met de ombouw, waarop de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructie staan afgebeeld.
- Controleer voor elke gebruiksday de werking van de unit door deze een keer te gebruiken.
- Controleer regelmatig het inhoudsniveau van PureMed (zie 5). Vervang zo nodig tijdig het reservoir (zie 6).

Werking

- Steek beide handen in de openingen van de unit en houd de vingers gespreid.
- Druk vervolgens met de voet éénmaal het voetpedaal in. De handen worden in de unit in de handpalm besproeid met PureMed handreinigingsmiddel.
- Trek de handen terug uit de unit en wrijf de PureMed goed over de handen.
- Laat de handen aan de lucht laten drogen (dit duurt maximaal 30 seconden).
- De handen zijn veilig gereinigd en gehydrateerd.
- Bij gebruik door kinderen altijd onder begeleiding van een volwassene.

Veiligheid

- Roken en open vuur zijn verboden in de buurt van de unit, middels pictogrammen op de ombouw van de unit is dit ook aangeven.
- De handreinigungsunit is geen speeltoestel, klimtoestel of speelgoed.
- Handreiniging door kinderen altijd onder begeleiding van een volwassene.
- Laat controle van de handreinigungsunit altijd over aan een volwassene.
- Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing, de aanduiding 'handreinigungsunit' en de pictogrammen altijd zichtbaar zijn op de ombouw rond de handreinigungsunit.
- Indien de gebruiksaanwijzing, de aanduiding 'handreinigungsunit' en/of de pictogrammen niet of gedeeltelijk niet leesbaar zijn, stel dan de unit buiten gebruik.

- PureMed is een handreinigingsmiddel, de vloeistof is uitsluitend bedoeld ter hygiënische reiniging (desinfectie) van handen.

Controle voorraad reservoir PureMed

- Laat controle van de voorraad PureMed altijd over aan een volwassene.
- Het reservoir (jerrycan) van 5 liter PureMed is voldoende voor ca 1.650 handreinigingen.
- Controleer het inhoudsniveau regelmatig.
- Maak de klep los en til deze omhoog. Door de transparante jerrycan is de hoeveelheid aanwezige PureMed te checken.
- Voorkom 'leegpompen' van de unit door de jerrycan tijdig te vervangen voor een gevuld exemplaar.

Vervangen reservoir (jerrycan) PureMed

- Laat het vervangen van de jerrycan PureMed altijd over aan een volwassene.
- Houd ook bij vervangen van de jerrycan de veiligheidsregels in acht: roken en open vuur verboden.
- Maak de klep los en til deze omhoog.
- Draai de dop met het dunne slangetje los van de jerrycan. Laat het slangetje in de dop.
- Plaats een nieuwe jerrycan.
- Draai vervolgens de (oude) dop weer op de jerrycan.
- Druk op het voetpedaal tot er PureMed uit de sproeikop komt.
- Sluit de klep aan de achterzijde van de unit.

PureMed

De handreinigingsunit werkt met PureMed hydraterend handreinigingsmiddel op basis van medische formulering. Bij gebruik van andere (liquide) producten dan PureMed vervalt de garantie.